

SURVOL DE L'INDICATEUR DE GLYCÉMIE BREEZE[®]2 :



1. Ouverture de l'appareil

Tourner l'appareil (écran vers le bas) et l'ouvrir en appuyant sur le bord arrière du loquet d'ouverture, puis en le soulevant.



2. Insertion de la cartouche

Insérer une cartouche neuve de 10 bandelettes d'analyse (côté bosselé sur le dessus).

Fermer l'appareil d'un coup sec.

IMPORTANT

Garder l'appareil à plat.

3. Préparation du dispositif de prélèvement sanguin



Retirer le capuchon-embase du dispositif MICROLET[®]2.

Tourner le capuchon protecteur de la lancette d'un quart de tour (sans l'enlever).

Insérer ensuite fermement la lancette pour armer le dispositif.

En tournant, enlever le capuchon de la lancette et remettre le capuchon-embase.


Consulter le feuillet d'emballage de MICROLET2 pour des renseignements complets.

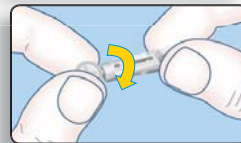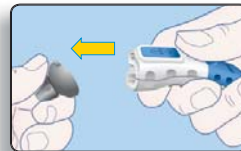

4. Sortie de la bandelette d'analyse

Tirer et pousser la tirette de l'appareil pour exposer une bandelette d'analyse; l'appareil se met automatiquement en marche.

Remarque : Le bouton de dégagement se SOULEVE, une bandelette d'analyse sort de l'appareil et un symbole en forme de goutte clignote à l'écran. L'appareil est maintenant prêt pour l'épreuve de glycémie.

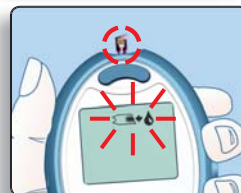

5. Épreuve

Pratiquer une incision sur le doigt et former une goutte de sang **ronde**.



Mettre toute l'extrémité de la bandelette d'analyse en contact avec la goutte de sang. Le sang est automatiquement absorbé par la bandelette d'analyse et la remplit entièrement.




Maintenir la bandelette d'analyse en place jusqu'à ce qu'un signal sonore se fasse entendre et que le compte à rebours commence, puis la retirer.



Le résultat de l'épreuve s'affiche sur l'écran au bout du compte à rebours de 5 secondes et est enregistré dans l'appareil pour une utilisation future.



Tenir l'appareil au-dessus d'une poubelle, la bandelette vers le bas, et appuyer sur le **bouton de dégagement**.

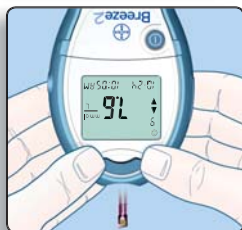


La bandelette d'analyse utilisée tombera dans la poubelle.

Appuyer sur le bouton  pour mettre l'appareil hors fonction et économiser la pile. (Voir à l'intérieur du rabat de la couverture.)

CODES D'ERREUR ET SOLUTIONS DE DÉPANNAGE



La bandelette d'analyse ne s'est pas remplie entièrement. Refaire l'épreuve avec une nouvelle bandelette d'analyse.

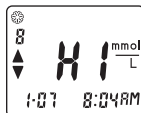

Le résultat d'épreuve est supérieur à 33,3 mmol/L. Laver les mains et le point de prélèvement, puis refaire l'épreuve. Si HI apparaît de nouveau, communiquer avec votre médecin ou un professionnel de la santé.



La pile est faible. Remplacer la pile (CR2032) avant d'avoir effectué une vingtaine d'épreuves ou en moins d'une semaine.

Consulter le *Manuel de l'utilisateur* pour des renseignements complets sur les codes d'erreur et les solutions de dépannage ou appeler le Service d'assistance au : **1-800-268-7200**



Bayer HealthCare

Fabriqué pour :
Bayer HealthCare LLC
Mishawaka (Indiana) 46544 E.-U.

Distribué par :
Bayer Inc.
Toronto (Ontario) M9W 1G6

Bayer et la croix Bayer sont des marques déposées de Bayer AG utilisées sous licence.
®/MC Marques de commerce de Bayer HealthCare LLC utilisées sous licence.

50184416

© 2008 Bayer HealthCare LLC

Rév. 4/08



Breeze²

ENSEMBLE POUR LA SURVEILLANCE DE LA GLYCÉMIE



AIDE-MÉMOIRE